


TD Snap Core First

Utbildningskort

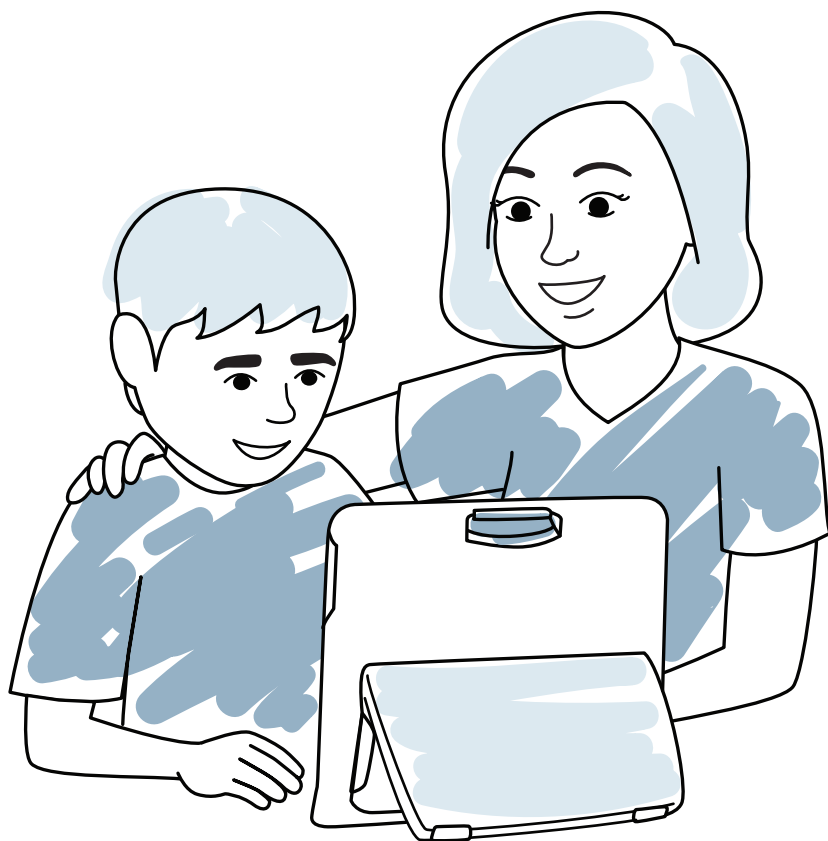

tobii dynavox

Här är dina utbildningskort för TD Snap Core First. De hjälper dig att börja använda programmet i vardagen och ger dig en introduktion till grundläggande redigering.


Innehåll

1	QR-koder och vanliga frågor och svar
2	Ordlista för TD Snap Core First
3	Använda AKK
4	Komma igång med användning och viktig information
5	Aktiviteter: Läsa en bok och spela ett spel
6	Aktiviteter: Titta på sport och besöka en restaurang
7	Söknapp och ändra storleken på rutnätet
8	Använda Google-assistenten med TD Snap
9	Redigera en knapp och beteendestöd
10	Dela och spara dina sidor
11	Pathways för Core First och myTobiiDynavox.com
12	Ytterligare support



QR-koder

Vi använder oss av QR-koder så att du kan få snabb åtkomst till information. T.ex., videor utan att behöva ange webbadresser. Skanna QR-koden med hjälp av kameran på din smarta telefon för att visa den länkade informationen.

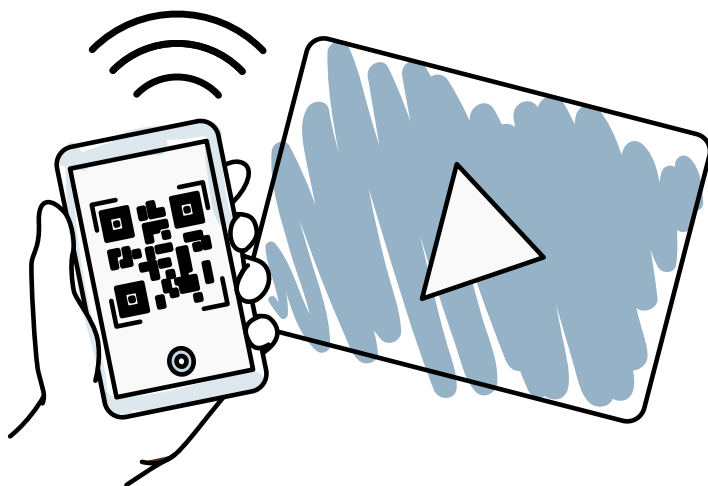

Användare av Android

Hämta hem gratisappen för QR-kodläsare från Google Play-butiken. Sök "QR-skanner" eller "QR-läsare" för att hitta alternativ.

Användare av Windows

Hämta hem gratisappen för QR-kodläsare från Windows-butiken. Sök "QR-skanner" eller "QR-läsare" för att hitta alternativ.

Användare av iOS

Har du iOS 11, kan du öppna din telefonkamera och peka den mot QR-koden. Tryck på meddelandet som visas.

Om du inte har uppdaterat till iOS 11, ska du hämta hem en app för QR-kodskanner. Det finns flera gratisappar i App Store.



Vanliga frågor och svar

Kommer AKK hindra en person från att prata?

Nej. Faktum är att, det finns ett decennium av forskning som påtalar att AKK inte hindrar en person från att använda eller att utveckla naturligt tal.

Är AKK användbart för en person som har visst tal?

Ja. AKK ger stöd för att hjälpa en person med kommunikationssvårigheter att nå sin fulla potential när de samtalar självständigt med både bekanta och okända kommunikationspartners.

Finns det någon lösning om en individ har fysiska funktionshinder och inte kan peka på en kommunikationsenhet?

Ja. Det finns många olika sätt för någon i den här situationen att göra val på en AKK-enhet. Detta kallas ofta åtkomstmetoden. Personer som inte kan röra kommunikationsenheten kan använda ögonstyrning, huvudpekare, mus eller kontaktskanning som deras primära styrsätt.

Kan en person vara för ung eller ha för nedsatt förmåga för att använda AKK?

Nej. Du kan aldrig vara för ung eller ha för nedsatt förmåga för att förbättra kommunikationen.

AKK påverkar språkutveckling, kognition och läs- och skrivförmågor positivt, samt underlättar deltagande i lek samt sociala och pedagogiska miljöer.

Skanna denna kod för mer vanliga frågor och svar.



Skanna denna kod för att se ett videoklipp om metoder för åtkomst på högteknologiska enheter.



Ordlista för TD Snap Core First


Basord

En liten uppsättning ofta förekommande ord som kan kombineras för att skapa unika meddelanden.



Snabbord

Små ord och fraser som används i vardagliga miljöer för att hålla konversationen igång, få uppmärksamhet, eller kommentera.

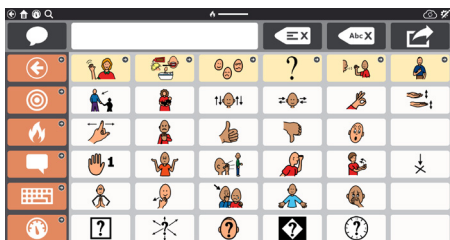


Ämnen

Förlagrade meddelanden, organiserade med kommunikativ avsikt, och relaterade till en specifik situation eller miljö.




Verktygsfält

Verktygsfältet är där alla kommunikationsverktyg finns. Hitta verktyg som Basord, Ämnen, och Snabbord härifrån.

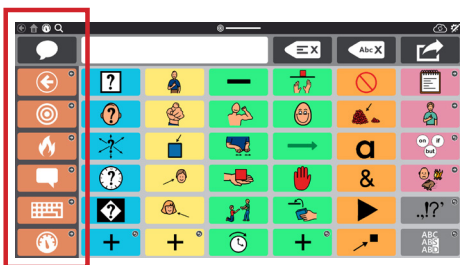

Kategorier och ämnesord

Listor med ord organiserade efter kategori (t.ex. mat, husdjur och så vidare). Ämnesord är organiserade efter kategori och relaterade till ett visst ämne.

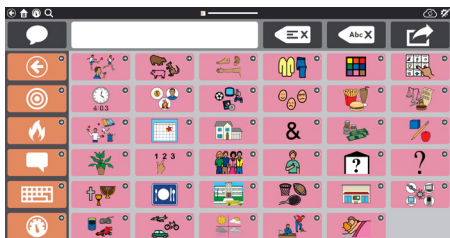


Ordlista för TD Snap Core First



Beteendestöd (finns i varje ämne)

Först...Sedan

Visa en individ vad som händer först och vad som kommer att hända efter.

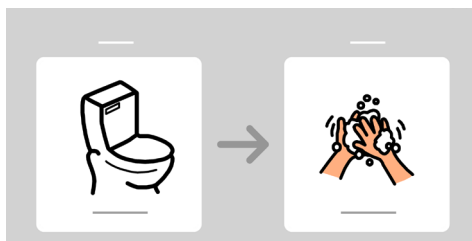


Minischeman

Visa ordningen av en liten uppsättning aktiviteter.




Socialt berättande (Manus)

Berättelser som beskriver en situation och bekräftar hur en person kan känna sig och hanterar det på ett positivt sätt.

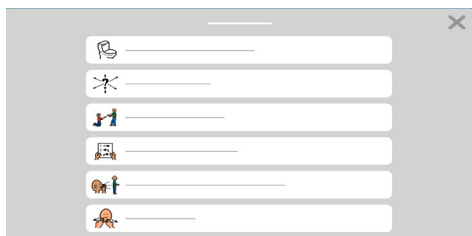


Visuell timer

Visar hur mycket tid som återstår i en aktivitet.

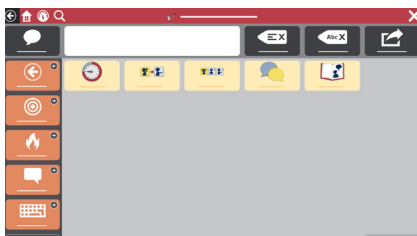

Kontrollpanel

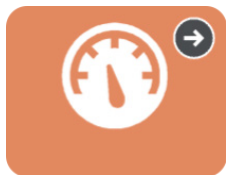

Instrumentpanelen innehåller enhetskontroller, som volym och fjärrkontroller. Du kan komma åt den från verktygsfältet.

Redigeringsverktyg



Gör ändringar i innehållet eller inställningarna.



Använda AKK

Användande av AKK innebär att stödja individernas möjligheter att engagera sig och delta i vardagliga aktiviteter. Det första steget till framgångsrik implementering är att vara en bra kommunikationspartner.

Färdigheter i kommunikation med partner är tekniker som du kan använda för att hjälpa kommunikatören att bli mer effektiv.

Se möjligheter

Identifiera tidpunkter under dagen då en individ kan lära sig och öva på färdigheter i kommunikation. T.ex. hjälp dem att använda TD Snap Core First för att kommunicera deras val av mellanmål eller film att titta på.



Skapa en positiv kommunikationsmiljö

Använd attityd och strategier som uppmuntrar kommunikation.

- **Förutsätt kompetens**
"Jag vet att du kan göra detta."
- **Fokusera på användning, inte att testa**
Istället för att säga "Ta fram boken." Säg "Det är lästid. Vilken bok ska vi läsa?"
- **Svara på alla kommunikationsformer.**
Lärande: Ler mot dig.
Partner: "Tja, hej på dig också!"
- **Vänta**
Partnern räknar till fem innan de ger hjälp för att hitta ordförråd.

Skanna denna kod för att titta på ett videoklipp om att skapa en positiv kommunikationsmiljö.



Använda AKK

Modellering

Modellering har visat sig vara det bästa sättet att lära människor att kommunicera med AKK. Modellering innebär beröring och användning av enheten när du pratar och interagerar med personen.

- Modellering handlar om att visa personen hur man kommunicerar.
- Kräver ingen imitation.
- Modellera nyckelord istället för varje ord du säger.
- Modellera när du letar efter ordförråd.
- Det är OK att göra fel. De ger dig chansen att modellera hur du korrigerar dem.
- Modellering varken frågar eller testar.



Skanna denna kod för att titta på ett videoklipp som visar modellering.



Håller du utkik efter framgång?

Att söka framgång är mer än bara vad individen kommunicerar som du förväntar dig, när det förväntas och hur du förväntar dig det.

Framgång kan inkludera:

- Ökad uppmärksamhet för interaktion
- Initiering till kommunikation
- Användning av större ordförråd
- Längre interaktioner
- Större glädje av interaktioner
- Ökat oberoende i kommunikation

Skanna denna kod för att titta på ett videoklipp om att söka framgång.



Komma igång med användning

Grattis! Låt oss komma igång och diskutera hur du kan använda TD Snap Core First i din vardag.

Vi har skapat fyra aktiviteter för att komma igång. Välj aktiviteter som är motiverande och blir engagerande. Känn dig fri att upprepa aktiviteter eftersom upprepning stöder lärande.



Undvik som nybörjare att göra dessa misstag!

- Du behöver inte skapa något från början. Vi har byggt ramen. Bekanta dig med vad som finns i TD Snap Core First och anpassa det sedan för användaren.
- Utsätt inte användaren eller dig själv för alltför för hård press. Slutföra varje uppgift med noggrannhet i början är inte realistiskt. Det är okej att göra misstag. Använd de tips som vi gav på kort #4 – "Använda AKK" för att ge möjligheter för individen att engagera sig och delta.

**För mer
detaljerade mål
och lektionsplaner,
granska kort #11
– Pathways för
Core First och Core
First-inläring.**



Viktig information:

Utbildningar: www.tobiidynavox.com/sv/utbildningar


Nummer till teknisk support: +46 8 522 950 20 (välj 1 för support)

Anteckningar:



Aktivitet

Läsa en bok.

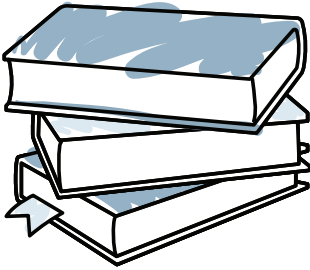

Material

TD Snap Core First
Ämnet läsning

En favoritbok

En bekväm plats

Förberedelser

Välj ämnen i verktygsfältet. Lokalisera ämnet för läsning och granska ordförrådet innan du påbörjar aktiviteten.



Stegen



- 1** Presentera boken och visa omslaget. Diskutera vad boken kommer att handla om.
- 2** Läs varje sida och pausa i slutet för att ge möjligheter till kommunikation.
- 3** När du läser, ska du pausa för att kommentera och ställa frågor (t.ex., Vad tycker du hittills? Är den läskig? Jag tror att pojken var rädd.).
- 4** När du har läst färdig boken, ställ inga frågor. Istället, be dem att berätta hur de kände sig eller vad de tyckte om berättelsen.



Hjälpfulla tips

- Om det finns en upprepad mening i berättelsen och du har en tom knapp på sidan, ska du programmera meningen på knappen.
- Välj knappen närhelst den upprepade meningen visas.
- Meddelanden som "Vänd bladet" och "Läs det igen" är redan programmerade i din enhet.
- Kommentera allt som barnet tittar på och/eller pekar på i miljön. När du är klar, ska du förstärka hur bra de kommunicerade med dig.
- Granska boken igen med fokus på bilderna. Lagg märke till orden i enheten som matchar bilderna och modellen genom att välja dem.



Aktivitet

Spela ett spel



Spelidéer

Go Fish, War, Bingo, Memory, Candyland

Förberedelser

Välj ämnen i verktygsfältet. Lokalisera spelämnet och granska ordförrådet innan du påbörjar aktiviteten.



Material

TD Snap Core First
Ämnet idrott

**Ett favoritbrädspelell
kortspel**

Snacks (tillval)

Stegen



- 1 Presentera spelet och gå igenom reglerna om du inte har spelat det tidigare.
- 2 Börja spela spelet med det ordförråd du granskade.
- 3 Ta pauser för att kommentera om hur spelet går.
- 4 När spelet har avslutats, ska du ta dig tid att kommentera.



Hjälpfulla tips

- Undersök mappen Spelord under ämnesord för fler ordförråd.
- Meddelanden som "Min tur", "Spela igen," och "Jag gillar inte det här spelet" är redan programmerade i din enhet.
- Låt användaren hålla reda på allas tur (min tur, din tur) genom att välja de lämpliga knapparna.



Aktiviteter

Titta på sport



Material

TD Snap Core First
Ämnet idrott

En sporthändelse som
favorit

Snacks (Tillval)

Förberedelser

Välj ämnen i verktygsfältet. Hitta ämnet för idrott och granska ordförrådet innan du påbörjar aktiviteten.



Stegen



- 1** Presentera det idrottsevenemang du tittar på och granska vilka lag som spelar.
- 2** Visa hur du navigerar och aktiverar knappar för att göra roliga kommentarer under spelets gång.
- 3** När aktiviteten är över, ska du granska alla framgångsrika kommunikationsförsök (t.ex., "Jag gillade verkligen hur du pekade på bollen för att visa mig att du gillade det.").



Hjälpfulla tips

- Använd redigeringsknappen för att lägga till ditt favoritlag i knappen som säger "Favoritteam []".
- Meddelanden som "Är det någon match idag? Jag älskar det här laget, De är urdåliga" finns redan programmerade i din enhet.
- Om du har en tom knapp, kan du programmera ett roligt jubel för ditt team.



Aktiviteter

Besöka en restaurang



Material

TD Snap Core First
Ämnet restaurang

En favoritrestaurang

Smaskens mat

Förberedelser

Välj ämnen i verktygsfältet. Lokalisera ämnet för Restaurang och granska ordförrådet innan du påbörjar aktiviteten.



Stegen



- 1 Diskutera om att gå till restaurangen.
- 2 Du kan börja modellera ordförråd innan du ens har tagit dig till restaurangen. Till exempel, välj knappen "Låt oss gå ut och äta".
- 3 När du befinner dig vid restaurangen, modellera med enheten under hela måltiden.
- 4 När måltiden är avslutad, granska alla framgångsrika försök till kommunikation. (t.ex., "När du tryckte på "mera" Visste jag att brädet skulle skickas över!").




Hjälpfulla tips

- Meddelanden som "Kan vi äta ute?," "jag älskar det här stället" och "Jag ser inget som jag vill ha här" är redan programmerade i din enhet.
- Uppmuntra alla vid bordet till att vara involverade, inklusive servicepersonalen.



Söka efter ett ord

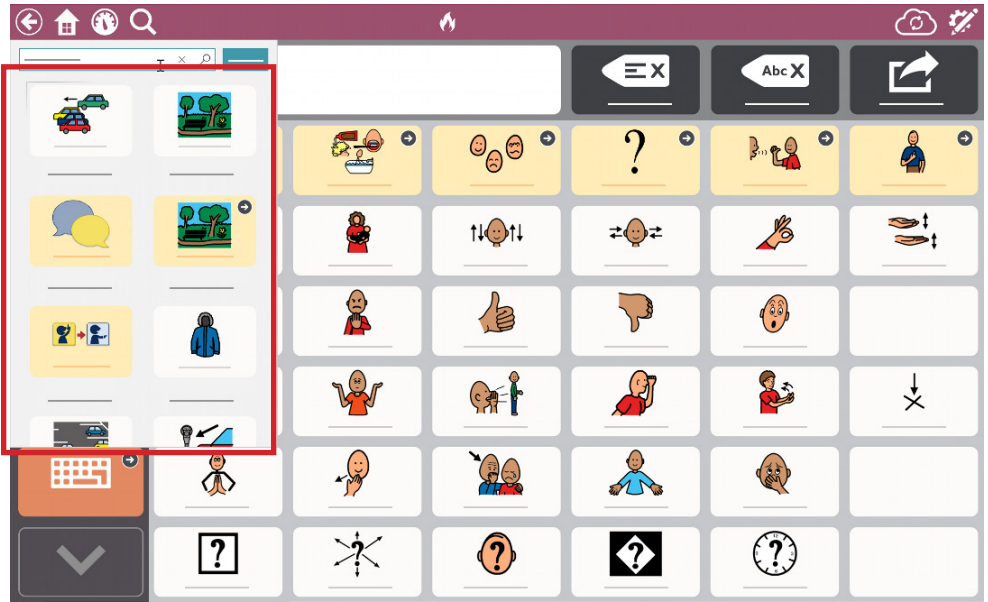

Skanna denna kod
för mer information
om sökfunktionen.



- 1 Välj sökverktyget.
- 2 Markera textrutan och ange ordet som du vill hitta.
- 3 I listan med alternativ, välj det önskade resultatet.
- 4 Följ den markerade sökvägen för att hitta ditt ord eller din fras.



Ändra storlekar på rutnätet

Vi rekommenderar att man prioriterar användarens förmåga att välja knappar med exakthet. Åtgärden att fysiskt komma åt kommunikationsenheten kräver övning. Börja med en mindre storlek på rutnätet. När användaren har vant sig att använda enheten, kan de kanske gå till större storlekar för rutnätet. Att ändra storleken på rutnätet är enkelt och TD Snap Core Firsts siduppsättning är utformad för att hålla ordförrådets placering konsekvent över storlekar för rutnätet.


Skanna denna kod för att se ett kort videoklipp om hur du ändrar storleken på rutnätet.




1 Välj knappen Redigera.



2 Välj fliken Siduppsättning.

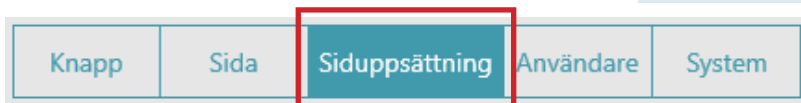

3 Välj Rutnätsstorlek.

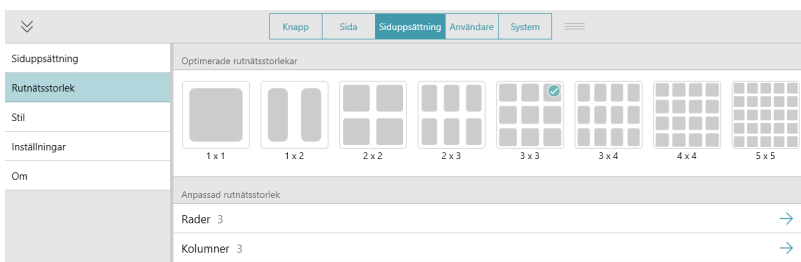

4 Välj från de optimerade storlekarna för rutnätet.

5 Välj Klar.



Använda Google-assistenten med TD Snap

Tillägg till TD Snap Core First träningskort


De Google-assistentsidor som används i TD Snap är sorterade efter funktion. Knapparna på dessa sidor låter dig hantera vardagsuppgifter, spela musik, ställa frågor och t.o.m. styra ditt hem med Google-assistenten.

Hitta sidor för Google-assistenten i TD Snap:

- 1 Välj **Instrumentpanel** i verktygsfältet.



- 2 Välj **Google-assistenten**.

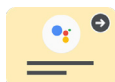

Ikonerna visar vilken utrustning du behöver för att använda den specifika knappen.



Ingen ytterligare hårdvara krävs.



Smart uttag, glödlampa och/eller termostad krävs.



Minienheten Google Nest eller aktiverade Google-assistentenhögtalare krävs.



Logitech Harmony Hub krävs.

Tips för att det ska fungera bra:

- När musik spelas på väldigt hög nivå kan det vara svårt att stänga av den eller ge kommandon.
- Om du inte får det svar du förväntar när du skickar ett Google-kommando, prova att använda andra ord eller vara mer specifik.
 - Exempel: Om "Hej Google, tänd lampan" inte fungerade, prova "Hej Google, tänd ljuset i vardagsrummet".
- Kom ihåg att när du använder en extern Google-högtalare måste du säga "Hej Google" före kommandot.
- Se till att du har ett sätt att be om hjälp och ett backup-system för automatiserade hemfunktioner.
- Spel fungerar bäst när de inte kräver specifika svar och ger tillräcklig tid för att svara.



Vanliga frågor om Google-assistenten

Behöver jag appen Google Home?

- Ja, du behöver ha appen Google Home på din telefon eller surfplatta om du har köpt extrautrustning (t.ex. Google Nest Mini, smarta kontakter, m.m.).

Behöver jag ett Google-konto?

- Ja, du behöver ett gratis Google-konto för att använda Google-assistenten. Du måste ansluta ditt Google-konto till TD Snap (Redigera>Användare>Anslut till Google).

Kan jag lyssna på musik?

- Ja, du måste använda en extern Google-högtalare (t.ex. Google Nest Mini, Google Home Nest, osv.) och säkerställa att enheten fortfarande kan höras över musiken.

Kan jag styra belysningen i mitt hem?

- Ja, med rätt utrustning kan du styra belysningen i ditt hem.

Jag har en smart apparat i mitt hem. Kan jag styra den med Google-assistenten?

- Ja. Läs vägledningen du fick tillsammans med din apparat för detaljerad information.

Kan jag använda Google-assistenten för nödsamtal?

- Nej, Google-assistenten ringer INTE nödsamtal.

Hur får jag support?

- Vid problem med programvaran TD Snap, kontakta Tobii Dynavox tekniska support.
- För problem med smart utrustning, gå till tillverkarens webbplats.

Google Support, felsökning:

- <https://qrco.de/GoogleAssistantExplore>
- <https://qrco.de/GoogleAssistantHelp>
- <https://qrco.de/GoogleNestHelp>

Skanna QR-koden
för att läsa hela
guiden för Google-
assistenten med TD
Snap.




Redigera en knapp

- 1 Gå till sidan med den knappen som du vill redigera.

- 2  Välj Redigera.

- 3 Redigeringspanelen dyker upp längst ner på skärmen. Märk väl att "Knappen" redan är markerad.

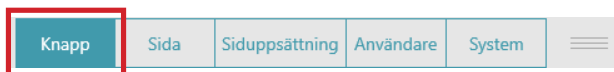

- 4 Markera knappen du vill redigera.
- 5 Så här ändrar du symbolen på knappen:



Markera Söknappen för att hitta en symbol.



Välj knappen Kamera för att lägga till ett foto.

- 6 Ska du ändra texten som visas på knappen, anger du det i etikettfältet. Så här ändrar du meddelandet som är infogat eller talat när knappen är vald. Ange i fältet Meddelande.
- 7 Välj Stil för att ändra knappens färg, kant, kanter eller layout.
- 8 Redigera åtgärderna för att ändra vad som händer när knappen är vald.



- 9 När det är slutfört, väljer du Klar.

Skanna koden för att få mer information om hur man redigerar knappar.



Redigera beteendestöd

- 1 Leta upp sidan Stöd som innehåller beteendestöd som ska redigeras.



- 5 Välj ikonen med blyertspenna i valfri rad för att göra ändringar.




- 2 Välj Redigera.



- 6 Välj knappen Förhandsgranska längst ner i redigeringspanelen som support för att förhandsgranska dina ändringar i beteendestöd.

- 7 När det är slutfört, väljer du Klar.

- 3 Markera knappen för det stöd som ska redigeras.

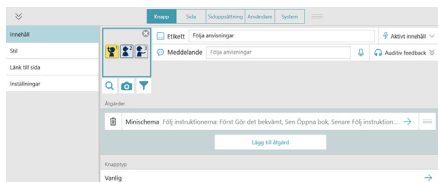

- 4 Välj åtgärden (Minischema, Visuell timer, Först sen eller skript).



Dela och spara dina sidor: Synkronisering

Synkronisering låter dig:

- Använd samma version av Siduppsättningen på flera enheter
- Dela siduppsättningen med andra
- Redigera på distans
- Spara din siduppsättning i molnet med ett enda klick

Till skillnad från att kopiera, är synkroniserade sidor kopplade till varandra via en aktuell version i molnet.

När du väljer Synkronisering, skickar du ändringar som du har gjort i molnet och får ändringar som andra har gjort.

När alla anslutna enheter har synkroniserats, har de alla samma version av siduppsättningen!



Det här är
din knapp för
synkronisering. Den
hittas i det översta
fältet för TD Snap.

För mer information
om synkronisering
och myTobiiDynavox.
com, ska du skanna
denna kod:




Dela och spara dina sidor:

Spara i en fil

Din TD Snap-användare och sidor kan säkerhetskopieras till en fil. Dessa filer kan lagras och delas på myTobiiDynavox.com, eller så kan du spara dem lokalt på din enhet eller USB.



**Synkronisera
eller spara till
en fil?**

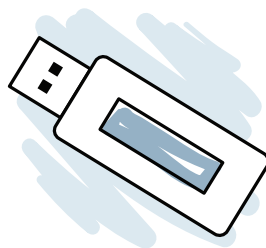

Sync/Synkronisering

Synkronisering är mest användbar när användaren flyttar mellan flera enheter. Kanske har de en enhet i skolan och en annan hemma. Synkronisera siduppsättningen mellan de två enheterna för att säkerställa kontinuerliga rutiner.

Synkronisering kan också användas för att redigera på distans, utan att störa användaren. Till exempel, kan användaren fortsätta använda sin kommunikationsenhet under tiden som du redigerar siduppsättningen på din dator. Synkronisera på datorn och sedan på kommunikationsenheten för att få tillstånd ändringar.

Synkronisering kan också användas som en bekväm metod för säkerhetskopiering för en enda enhet. Varje gång du synkroniserar, skapar du en säkerhetskopia till molnet.

Spara i en fil

Spara till en fil är bättre för att dela med personer som vill göra egna ändringar, separerat från dig, och när du bara vill spara eller dela ett par sidor, och inte en hel siduppsättning.

Spara till en fil är bra när du inte har en uppkoppling till Internet. Skapa en säkerhetskopia för dig själv eller lägg filen på en USB-enhet för att dela med någon annan.

Spara till en fil är det enda sättet att backa upp en användare, inklusive alla deras inställningar.



Pathways för Core First

Pathways för Core First är en KOSTNADSFRI partnerapp som ger expertråd om hur man engagerar användare av TD Snap Core First.



Pathways tar dig igenom färdigheterna steg för steg som hjälper dig att maximera fördelarna i AKK-kommunikation med TD Snap Core First.

- Konfigurera TD Snap Core First
- Anpassa TD Snap Core First genom att lära dig att redigera
- Testa programmet med roliga aktiviteter
- Bygg kommunikationsfärdigheter
- Bygg operativa färdigheter
- Bygg sociala färdigheter
- Uppmuntra positivt beteende
- Identifiera målen med hjälp av vårt rutnät för målen
- Lär dig de bästa tipsen för att uppmuntra tillväxt
- Spåra framstegen



Skanna denna kod för mer information på Pathways för Core First:



tobiidynavox



Ditt gratis myTobiiDynavox.com-konto ger dig åtkomst till många fördelar inklusive molnlagring för säkerhetskopior, synkronisering av siduppsättning och delning, lektionsplaner och mer!

myTobiiDynavox.com



När du registrerar dig för myTobiiDynavox kan du göra följande:

- Säkerhetskopiera ditt system på ett säkert sätt
- Hämta hem verktyg och resurser helt gratis
- Granska gratis lektionsplaner för Core First
- Läs mer om tillgängliga uppdateringar
- Få åtkomst till teknisk support och vanliga frågor och svar
- Dela siduppsättningar och sidsamlingar



Extra support

Webbforum: bit.ly/FBcomSE

Teknisk support i Sverige: **08 522 950 20 (välj 1 för support)**

12007994 Tobii Dynavox Snap CF Training Cards v1.2 - sv-SE

